


Tuss-struten

Tillägnad den modiga lilla råttan **Tuss** som inspirerade till konstruktionen.
Hon gav sjukdomen en bra fight.

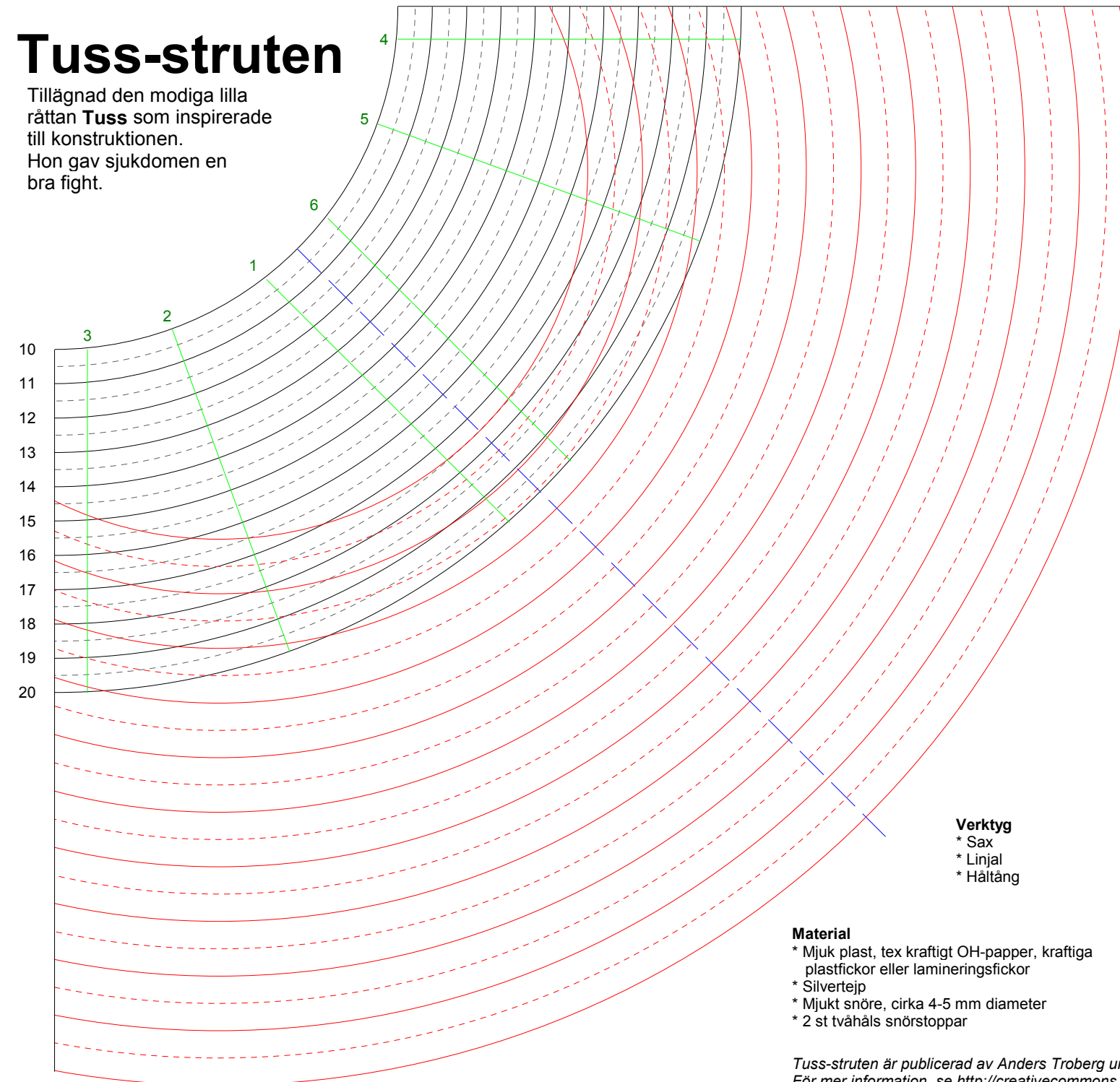

Instruktioner

1. Mät omkrets på halsen i cm.
2. Klipp efter den svarta linje vars siffra stämmer med omkretsen.
3. Mät hur lång struten behöver vara (hals till nos).
4. Mät upp denna längd från det första klippet. längs den blå linjen och klipp efter rätt röd linje.
5. Klipp efter ytterkanterna.
6. Förstärk innerkanten med silvertejp. Detta tar bort skarpa kanter.
7. Klipp ett jack, cirka 15 mm från innerkanten, parallellt med innerkanten, 15 mm djupt. Detta för att man ska kunna justera storleken lite med snöret.
8. Med en håltång, gör hål vid de sex gröna linjerna, cirka 3 mm från innerkanten.
9. Rulla ihop till en strut, och tejpa ihop upptill med silvertejp. Tejpa inte över flikarna som klipptes i steg 7.
10. Trä snöret genom hålen i nummerordning, börja från utsidan av struten och gå hela vägen runt. Det ska nu finnas två utåtgående ändar nertill.
11. Korså ändarna och vik upp dem till ovasidan. Sätt en snörstopp där.
12. Trä in ändarna under de öglor som nu finns på respektive sida upptill på struten.
13. Sätt ytterligare en snörstopp på ändarna.

Användning

1. Lägg snörena som ska gå under bröstkorgen tillrätta och släpp efter snöret lite.
2. Lirka in djurets huvud i struten.
3. Lirka in frambenen under snörena. Snörena ska nu gå i kors över bröstet och mötas på ryggen.
4. Dra försiktigt åt den bakre snörstoppen lagom mycket.
5. Dra sedan åt den främre snörstoppen så att den sitter rätt så spänt mot struten.
6. Kontrollera att inget sitter för hårt.
7. Kontrollera ofta att det inte skaver.

Tips

- * Prova gärna på ett mjukdjur först så att du vet hur du ska göra.
- * Det är enklare om man är två när struten ska på.
- * När djuret har accepterat struten så kan man lossa rätt så mycket på den utan att den kan krånglas av.
- * Om snöret inte är väldigt lent, täck det på insidan med silvertejp.
- * Tänk på att djuret kan behöva hjälp att tvätta sig och klia sig.

Verktyg

- * Sax
- * Linjal
- * Håltång


Material

- * Mjuk plast, tex kraftigt OH-papper, kraftiga plastfickor eller lamineringsfickor
- * Silvertejp
- * Mjukt snöre, cirka 4-5 mm diameter
- * 2 st tvåhåls snörstoppar

Tuss-struten är publicerad av Anders Troberg under en CC-BY-SA-licens och får spridas fritt.
För mer information, se <http://creativecommons.org/licenses/>

Foton av en tidig version av Tuss-struten, utan förstärkande/skyddande silvertejp på kanten och lite för kort för att passa bra, men den visar hur den ska sitta. Tänk på att inte dra åt den för hårt, den behöver inte sitta hårt för att sitta stadigt, men samtidigt måste den sitta så att djuret inte kan trassla in sig. Bli inte förskräckt om djuret har svårt att ta sig fram med struten, de lär sig fort hur de ska göra. Ta regelbundet av struten och undersök så att det inte bildats skavsår. Ha också djuret i en sjukbur utan möjlighet att klättra, så att det inte faller och skadar sig, samt för att dess vanliga burkamrater inte ska pilla på såret.

Kom ihåg, ditt djur kommer **inte att gilla struten**, men det kommer **att acceptera den** och den är **mycket bättre än allvarliga komplikationer** för att djuret inte kan låta bli ett sår. Struten på bilden är första versionen av Tuss-struten, gjord av plast från en stadig plastmapp, paracord (fallskärmslina), silvertejp och två snörstoppar från en gammal tröja.

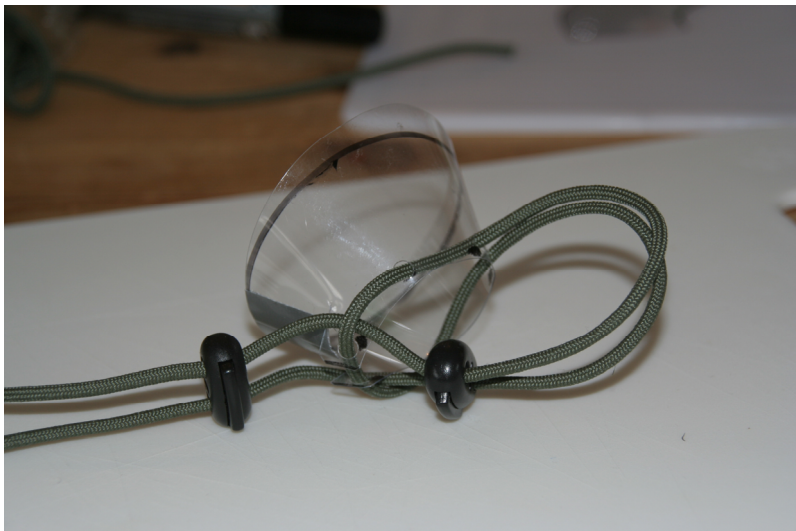

Färdig strut. Observera att bakre kanten ska förstärkas med tejp för att inte bli vass. Helst ska även snöret täckas med tejp på insidan för att inte skava.



Mjukisråtta, undersidan. Struten sitter dock oftast bättre om man korsar snörena över bröstet och risken för skavsår kring hakan minskas.



Strut på mjukisråtta. Observera speciellt hur den går ihop i nacken, vilket hindrar djuret från att kränga av den framåt-nedåt. Längden på struten passar mjukisråttan rätt bra, bättre än vad den passar Tuss till höger.



Tuss demonstrerar struten på en riktig råtta. Struten är dock för kort, den ska gå åtminstone några millimeter framför munnen, i stort sett fram till nosen. Se till att öronen ligger bra i struten och hjälp ofta djuret att klia sig och tvätta sig. Det är också nödvändigt att ge mat som kan ätas utan att tassarna behöver användas.